



Jernbanegade 27 · DK - 6000 Kolding
Tlf +45 75 10 24 10 · CVR DK33753489
info@enseyes.com · www.enseyes.com

MEGASOFT

Megasoft är en mjuk bandagelins

MEGASOFT

Megasoft är en mjuk bandagelins. Tack vare linsens storlek på 20,5 mm skyddar den ett stort område av det yttre ögat från påverkan. Linsen kan bäras permanent i 4 veckor.

LINSEN REKOMMENDERAS TILL

- Alla indikationer på behov av bandage-linser
- Sårhäkning efter trabekulektomi
- Symblepharon
- Avvikelser där stor diameter är fördelaktig

Megasoft linsen rekommenderas särskilt för ögonskydd efter Glaukomoperation. Under den här operationen görs suturen så lös att det finns utrymme för att tömma vätskan för att minska trycket i ögat. Under läkningen av ögat, ger Megasoft linsen ett effektivt skydd.

TEKNISK INFORMATION

Radie (BC): 10,00 mm

Styrka (BVP): 0,00 D

Diameter: 20,50 mm

Material: Xylofilcon B

Vätskeinhåll: 76%

Centrumtjocklek (CT): 0,55 mm

Dk: 46



PROCORNEA
MED+



LINSVÅRD

För att uppnå optimal komfort bör komfortdroppar användas morgon och kväll, samt vid behov under dagen. Efter 4 veckor skall linsen rengöras noggrant och desinficeras.

Det rekommenderas att alltid ha en extra lins för att inte riskera att vara utan bandagelins vid rengöring. Om linsen inte längre kan rengöras och desinficeras ordentligt måste linsen bytas ut.